



## CREMA DESTINATA AL TRATTAMENTO TOPICO DI FERITE CUTANEE NON INFETTE

**MODELLO #SLBCRVN50**

**MODELLO #DE01**

### Descrizione, destinazione e modalità d'uso

**#SLBCRVN50 e #DE01** è una crema destinata al trattamento topico di ferite cutanee non infette contenente acido ialuronico, dimeticone e vitamina E. La destinazione d'uso è il trattamento di piccole ferite, tagli, abrasioni, piccole ustioni localizzate e ulcere cutanee, comprese quelle causate dal diabete. Indicato anche in caso di irritazioni cutanee, irritazioni da pannolino, piaghe da decubito, ustioni e screpolature cutanee causate da agenti fisici, quali sole, freddo e vento. Indicata per adulti e bambini (3+).

**#SLBCRVN50 e #DE01** sono disponibili in confezione da 50 e 30 mL.

### Utilizzo

Lavarsi le mani prima e dopo l'uso. Prima di applicare il prodotto, pulire la zona da trattare. Applicare uno strato sottile ed uniforme su tutta la zona interessata 1-2 volte al giorno o secondo prescrizione medica. Lasciare asciugare spontaneamente la crema in modo che si formi la pellicola protettiva. Non esistono reali pericoli legati ad un eventuale sovradosaggio del prodotto, in quanto l'utilizzo della crema è esclusivamente topico. Utilizzare al bisogno, anche più volte al giorno per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi. Dopo l'apertura si consiglia di utilizzare il prodotto entro 3 mesi.

### Composizione

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Arachidyl Alcohol, Glycerin, Behenyl Alcohol, Phenoxyethanol, Arachidyl Glucoside, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Laureth-7, Sodium Hydroxide, Chamomilla Recutita Flower Extract, Silver Citrate, Hyaluronic acid, Dimethicone, Tocopheryl Acetate.











## Precauzioni e avvertenze

- Qualsiasi evento avverso o incidente grave verificatosi durante l'utilizzo del dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante individuato sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso.
- Se si verificano reazioni avverse o emerge un'allergia a uno qualsiasi degli ingredienti, il trattamento deve essere interrotto.
- Non ingerire.
- Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Non strofinare la crema sulla zona trattata dopo l'applicazione.
- Si consiglia di proteggere la parte medicata con una garza sterile.
- Chiudere bene il tubo dopo l'uso.
- Evitare il contatto diretto tra il tubo e la lesione.
- Il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona per evitare il rischio di contaminazione incrociata.
- Non utilizzare se il tubo è aperto o danneggiato.
- Tenere il foglio illustrativo a portata di mano in modo da poterlo consultare in caso di necessità.
- Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.
- Consultare il medico o il farmacista prima di utilizzare il prodotto nelle donne in gravidanza, in allattamento e nei bambini di età inferiore a 3 anni.
- L'uso della formulazione può occasionalmente causare irritazioni transitorie. Questo è l'unico effetto collaterale prevedibile del dispositivo, inoltre sarebbe occasionale e transitorio, senza necessità di contromisure.
- Non utilizzare in concomitanza con altre terapie o trattamenti in atto che comportino l'assunzione o l'uso topico di altri dispositivi medici, farmaci o integratori. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.

## Controindicazioni

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Rev. 3 - 29/04/2022

		 36 mesi	 SLBCRVN50 DE01	
	 Nirial Pharma S.r.l. Via Rovani, 7 20123 Milano	 5°C 30°C	