



## GOCCE OCULARI

### MODELLO #OC01

#### Descrizione, destinazione e modalità d'uso

**#OC01** Soluzione oculare sterile priva di conservanti adatta per tutti quegli stati di compromissione del film lacrimale che causano infiammazione, irritazione, rossore, bruciore, prurito, lacrimazione e fastidio a livello oculare, anche dovute a congiuntiviti allergiche, andando a ripristinare la naturale funzione barriera di difesa della componente lipidica del film lacrimale verso sostanze ed agenti microbici esterni e donando quindi sollievo alla tipica sintomatologia allergica.

Utilizzabile con lenti a contatto.

Indicato per adulti e bambini (3+).

**#OC01** è confezionato sia in contenitori monodose da 0,5 mL che in flacone pluridose da 10 mL

#### Utilizzo pluridose da 10 mL

1-2 gocce in ciascun occhio, 3-4 volte al giorno. Lavare accuratamente le mani.


- 1) Prima della somministrazione rimuovere il sigillo di garanzia.
- 2) Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione.
- 3) Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione sul flacone per instillare 1-2 gocce in ogni occhio, se non diversamente prescritto.
- 4) Dopo l'instillazione richiudere immediatamente il flacone con l'apposito tappo.

#### Utilizzo monodose da 0,5 mL

1-2 gocce in ciascun occhio, 3-4 volte al giorno. Lavare accuratamente le mani.

Dopo aver aperto la busta di protezione:

- 1) Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori.
- 2) Ruotare l'aletta ed estrarre il cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere il contenitore.

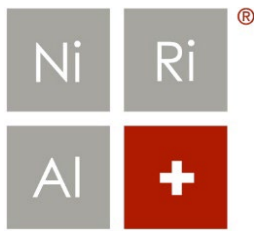

**P H A R M A**  
**C O S M E T I C S**


- 3) Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 1/2 gocce in ciascun occhio.
- 4) Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenitore può essere riutilizzato entro 24 ore dalla prima apertura.

### Composizione

Liposomi, acido ialuronico, estratto di Perilla, acido citrico monoidrato, sodio citrato tribasico diidrato, cloruro di sodio, acqua purificata.

### Precauzioni e avvertenze d'uso per entrambi i formati

- Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in caso di nota incompatibilità anche con uno solo dei componenti della formulazione.
- Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia ad uno o più componenti.
- In caso di reazioni indesiderate interrompere immediatamente il trattamento, consultare il medico e informare il fabbricante.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.
- L'uso di altro prodotto oftalmico (farmaco o dispositivo medico) deve essere effettuato almeno 15 minuti dopo l'instillazione di questi colliri. La somministrazione orale di altri dispositivi medici, farmaci o integratori in concomitanza con questi colliri deve essere effettuata sotto il controllo del medico.
- Se si utilizzano medicinali per la cura degli occhi, consultare il medico prima dell'uso.
- Prima dell'uso verificare che il prodotto sia correttamente chiuso e non danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- L'uso nei bambini deve essere supervisionato da un adulto.

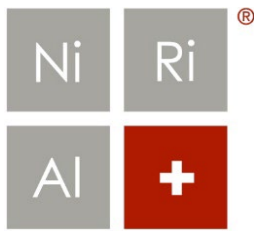

**P H A R M A**  
**C O S M E T I C S**

- Durante la gravidanza e l'allattamento consultare prima il medico.
- Tenere lontano da fonti di calore.
- Conservare lontano dalla luce solare.
- Non ingerire.
- Prodotto per uso esterno.
- Prodotto solo per uso oftalmico.

#### **Ulteriori precauzioni e avvertenze sull'uso per il formato monodose da 0,5 mL**

- Il prodotto può essere utilizzato da una sola persona.
- Dopo la prima apertura, il prodotto residuo in esso contenuto deve essere riutilizzato entro 24 ore.
- Chiudere bene il contenitore monodose dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se la busta in alluminio è danneggiata o se il flaconcino monodose non è perfettamente chiuso.
- Non toccare la superficie oculare, o qualsiasi altra superficie, con la punta del monodose.









#### **Ulteriori precauzioni e avvertenze sull'uso per il formato pluridose da 10 mL**

- Non toccare la superficie oculare, o qualsiasi altra superficie, con la punta del flacone.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il flacone dopo 90 giorni dall'apertura.

#### **Controindicazioni:**

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Rev. 1 - 03/10/2022

		 36 mesi	 OC01		
	 Nirial Pharma S.r.l. Via Rovani, 7 20123 Milano	