



SPRAY DESTINATO AL TRATTAMENTO TOPICO DI FERITE CUTANEE NON INFETTE

MODELLO #DE02

Descrizione, destinazione e modalità d'uso

#DE02 è una sospensione spray per uso topico per il trattamento delle lesioni cutanee non infette (es. abrasioni, escoriazioni, screpolature cutanee, tagli, piccole ferite chirurgiche, ustioni localizzate di primo e secondo grado) e delle lesioni superficiali del piede diabetico, del piede d'atleta e delle piaghe da decubito. La formulazione grazie ai suoi attivi favorisce l'assorbimento degli essudati e forma una barriera protettiva contro la penetrazione microbica creando un ambiente pulito e idratato che aiuta i naturali processi riparativi dei tessuti. Indicato per adulti e bambini (3+).

#DE02 è disponibile in confezione da 50 e 125 mL.

Utilizzo

- 1) Le lesioni devono essere pulite prima dell'applicazione.
- 2) Agitare energicamente il contenitore prima dell'uso per 15-20 secondi.
- 3) Tenendo il contenitore in posizione verticale, spruzzare ad una distanza di circa 15 cm dalla cute per 2-3 secondi una quantità di polvere sufficiente a coprire la superficie da trattare. In caso di inceppamento temporaneo della bomboletta agitare vigorosamente fino a sentire il rumore della sfera metallica contenuta al suo interno.
- 4) Dopo l'applicazione non massaggiare la zona interessata; la polvere deve formare uno strato continuo e protettivo.
- 5) Si suggerisce di coprire la parte medicata con una garza sterile.
- 6) Applicare da una a tre volte al giorno o secondo parere del medico, secondo l'evoluzione clinica.
- 7) Può essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica.

Composizione

Acido ialuronico sale sodico, caolino, amido di mais, argento metallico, olio di mandorle e riso, disilossano, terpineolo, vitamina E, propellente.



Precauzioni e avvertenze

- Uso esterno: non ingerire né inalare.
- Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua.
- Evitare di esporre alla luce solare le aree trattate.
- Evitare il diretto contatto dell'erogatore con la ferita.
- In caso di reazioni indesiderate interrompere immediatamente il trattamento, consultare il proprio medico ed informare il fabbricante.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
- Non esistono reali pericoli legati al possibile sovradosaggio del prodotto, in quanto l'uso dello spray è esclusivamente topico.
- Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicali. Non utilizzare in combinazione con altre terapie o trattamenti in atto che comportino l'assunzione o l'uso topico di altri dispositivi medici o farmaci.
- Per l'uso prolungato consultare il medico.
- Richiudere la confezione dopo l'uso.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza
- Nelle donne in stato di gravidanza e allattamento usare il prodotto previo consiglio del medico.
- Non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi.











Pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non contiene gas propellenti dannosi per l'ozono.

Controindicazioni

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Rev. 2 – 04.02.2024

		 36 mesi	 DE02	
	 Nirial Pharma S.r.l. Via Rovani, 7 20123 Milano	 5°C 30°C	