



SPRAY OCULARE

MODELLO #19473

MODELLO #19474

Descrizione, destinazione e modalità d'uso

#19473 Soluzione spray per somministrazione perioculare, per il trattamento dell'occhio irritato e arrossato, causato da:

- polline, polvere, peli di animali, trucco;
- alterazione dello strato lipidico del bordo palpebrale, es: blefariti;
- condizioni ambientali quali vento, esposizione al sole o inquinamento.

Grazie alla sua componente liposomiale, **#19473** è particolarmente indicato per proteggere l'occhio perché, una volta spruzzato direttamente sulla palpebra, è in grado di ripristinare l'equilibrio del film lacrimale idrolipidico, alleviando il disagio causato dalla sua alterazione. Inoltre, l'estratto di Aloe con proprietà rinfrescanti e lenitive calma dal prurito e lenisce i bruciori della zona perioculare. Contiene anche vitamina E, un antiossidante. Indicato per adulti e bambini (3+). Disponibile in confezione da 10 mL.

#19474 Soluzione spray per somministrazione perioculare, per il trattamento dell'occhio secco e stanco dovuto a:

- fattori ambientali e climatici: aria condizionata, ambienti poco umidi/polverosi o esposizione prolungata al sole;
- uso frequente di lenti a contatto;
- lavoro prolungato al computer o uso esteso di smartphone o tablet;
- fumo ed esposizione al fumo;
- inquinamento dell'aria;
- alterazione dello strato lipidico del bordo palpebrale, es: blefariti.



Grazie alla sua componente liposomiale, **#19474** è particolarmente indicato per queste patologie poiché, in quanto una volta spruzzato direttamente sulla palpebra, è in grado di ripristinare il film lacrimale idrolipidico, contribuendo ad alleviare rapidamente il disagio causato dalla sua alterazione. Inoltre, il pantenolo conferisce un'azione idratante alla palpebra e al contorno occhi. Contiene anche vitamina E, un antiossidante. Indicato per adulti e bambini (3+). Disponibile in confezione da 10 mL.

Utilizzo

Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. Agitare delicatamente il flaconcino. Al primo utilizzo, premere completamente la pompa spray 3-4 volte per consentirne il riempimento. Spruzzare a palpebre chiuse 1-2 volte da una distanza di circa 10 cm per 2-3 volte al giorno su ciascuna palpebra. La pressione dell'erogatore deve essere uniforme e senza interruzioni. L'erogazione dovrebbe essere completata fino al raggiungimento della fine della corsa dell'erogatore. L'erogazione deve essere eseguita con una velocità adeguata. Il dispositivo deve essere utilizzato in posizione verticale (non orizzontale o capovolto).

Utilizzare al bisogno, anche più volte al giorno per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi. Dopo l'apertura si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi. Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato nel contenitore originale e non danneggiato. Smaltire il prodotto non utilizzato una volta raggiunta la data di scadenza.

Precauzioni e avvertenze

- Agitare il flacone prima dell'uso.
- Evitare di toccare la superficie della palpebra con l'ugello dello spray.
- Evitare di toccare l'ugello dello spray con le dita.
- Per i portatori di lenti a contatto: il prodotto deve essere utilizzato tra un utilizzo e l'altro.
- **NON SPRUZZARE SUGLI OCCHI APERTI.** In caso di contatto diretto con gli occhi aperti, il prodotto può provocare una lieve sensazione di bruciore, che scompare rapidamente senza effetti collaterali. Se la sensazione di bruciore persiste, sciacquare gli occhi con abbondante acqua.



- Se si verificano effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto, contattare il medico e informare il fabbricante.
- Non utilizzare in concomitanza con altre terapie o trattamenti in atto che comportino l'assunzione o l'uso topico di altri dispositivi medici, farmaci o integratori.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere tempestivamente segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.
- L'uso di un altro prodotto oftalmico (farmaco o dispositivo medico) deve essere effettuato almeno 15 minuti dopo l'instillazione di questo spray oculare. La somministrazione orale di altri dispositivi medici, farmaci o integratori in concomitanza con questo spray oculare deve essere effettuata sotto il controllo di un medico.
- Prima del primo utilizzo verificare che il prodotto sia correttamente chiuso e non danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza stampata sulla confezione.
- Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità o allergia nota ad uno o più dei suoi ingredienti.
- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- L'uso nei bambini deve essere supervisionato da un adulto.
- In gravidanza e allattamento consultare prima il medico.
- Prodotto solo per uso esterno.
- Non sono note interazioni farmacologiche, ma è vietato l'uso contemporaneo con altri dispositivi medici o medicinali.

Controindicazioni

Sensibilità o allergia nota a qualsiasi ingrediente.

Rev. 2 - 29/07/2024

		 36 mesi	 19473 19474	
	 Nirial Pharma S.r.l. Via Rovani, 7 20123 Milano			